

SMARTBALLS

FUN FACTORY to estetyczne zabawki erotyczne z wysokogatunkowych i przyjaznych dla skóry materiałów. Doskonały pod względem formy design i harmonijny wygląd, połączony z przekonywającą funkcjonalnością nadają wszystkim produktom FUN FACTORY ich wyjątkowość. Jakość „Made in Germany“.

SMARTBALLS – informacje ogólne

SMARTBALLS zwane są również Loveballs, kulki waginalne lub kulki Gejszy. Delikatne i intensywne wibracje kulek, idealnie trenują mięśnie miednicy. Trenowana miednica wspiera zdolność do orgazmu kobiety i tym samym dba o więcej przyjemności w seksie.

SMARTBALLS original

Najgłębsza kobieca przyjemność!

Nadzwyczajne »SMARTBALLS original« przekonują poprzez wyjątkowy kształt i liczne kolory. Wykonane są z elastomedu, materiału nieszkodliwego dla ciała, neutralnego w zapachu, bardzo wytrwałego i łatwego w pielęgnacji.



SMARTBALLS teneo

»SMARTBALLS teneo« otoczone są silikonem. Ergonomicznie ukształtowane wgłębienie na palec „easy-in“ ułatwia wprowadzenie. Innowacyjna technika umożliwia bardzo wysoki bieg jak również równą i szybką rotację znajdujących się wewnątrz kulek.

SMARTBALLS teneo^{uno}

Jedyna w swoim rodzaju przyjemność!

»SMARTBALLS teneo^{uno}« sprawiają przyjemność przede wszystkim osobom uwielbiającym mniejsze wymiary. Kulki waginalne nadają się doskonale dla osób początkujących oraz dla kobiet z obniżoną macicą lub z macicą przekrzywioną do tyłu.



SMARTBALLS teneo^{duo}

Podwójna przyjemność!

Aksamitne i miękkie »SMARTBALLS teneo^{duo}« zachwycają miłośników kulek waginalnych dwiema kulkami. »SMARTBALLS teneo^{duo}« są mniej słyszalne niż »SMARTBALLS original«.



Użycie & funkcja

SMARTBALLS używane w celu wzmocnienia mięśni miednicy i wsparcia mięśni po porodzie, wprowadzane są wzdłuż linii pionowo do pochwy, sznureczek pozostaje na zewnątrz. Wibracje wewnętrznej kulki wywołują w miednicy reakcję, że trzeba coś przytrzymać. Dzięki temu trenowane są mięśnie. Kulki mogą pozostać w pochwie kilka minut lub też kilka godzin. Aby optymalnie wzmocnić ich działanie, można je nosić w życiu codziennym. Przy pomocy mocnego sznureczka kulki można wyciągnąć. Kobiety, które chcą trenować miednicę podczas ciąży, powinny używać kulek po konsultacji z lekarzem lub położną. Po porodzie, SMARTBALLS należy używać tylko wtedy, jeżeli ewentualne urazy związane z porodem zostały uleczone, krwawienia ustały, a gimnastyka poporodowa została rozpoczęta.

Materiał

Die »SMARTBALLS original« wykonane zostały z elastomedu, materiału nieszkodliwego dla ciała, neutralnego w zapachu, który także stosowany jest w medycynie. Sznurowadło do wyciągania otoczone jest również elastomedem. Powierzchnia oraz sznurowadło »SMARTBALLS teneo« składają się w silikonu, antyalergicznego materiału, stosowanego w medycynie.



Pielęgnacja

Przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym użyciu należy umyć kulki ciepłą wodą z delikatnym mydłem.

Wskazówka

Zastosowanie małej ilości żelu ułatwi przyjemne uczucie przy wprowadzeniu. W każdym opakowaniu SMARTBALLS znajduje się dokładna instrukcja obsługi jak również próbka żelu »TOYFLUID«. FUN FACTORY zaleca użycie żelu na bazie wody, jak np. FUN FACTORY »TOYFLUID«. Jeżeli zawierający silikon »SMARTBALLS teneo« będzie miał kontakt z żelem zawierającym silikon, FUN FACTORY nie wyklucza, że materiał przyjmie niepożądane zapachy.

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie SMARTBALLS nie są dostosowane do penetracji analnej, ponieważ możliwe jest wciągnięcie urządzenia przez zwieracz.

Kulki nie są zabawką dla dzieci i urządzenie należy trzymać z daleka od dzieci.

W przypadku zetknięcia między silikonową zabawką a żelem zawierającym silikon (»BODYFLUID«), FUN FACTORY nie wyklucza, że materiał przyjmie niepożądane zapachy.

Ochrona środowiska

Należy zadbać o usunięcie opakowania zgodnie z przepisami ochrony środowiska i skorzystać z możliwości recyklingu. Blister wykonany jest z przyjaznego dla środowiska materiału PET.